

Docklocs®

OVERDENTURE ATTACHMENT SYSTEM



ABUTMENTS4EVER



EL NUEVO SISTEMA DE FIJACIÓN DE SOBREDENTADURAS

Tecnología de recubrimiento innovadora


Patentado

Nuestro recubrimiento patentado de PVD (deposición física de vapor) de cerámica totalmente biocompatible proporciona muchas ventajas sobre los recubrimientos de pilares alternativos. Compuesto por una capa tremendamente dura de carbonitruro de zirconio (ZrCN), el revestimiento del pilar es más resistente a la abrasión y al desgaste en comparación con otros recubrimientos comunes.

Adicionalmente su impresionante tono oro rosa combina bien con la encía y proporciona una apariencia premium.

Conexión de doble inserción

Además del mecanismo de accionamiento trilóbulo compatible, los pilares Docklocs cuentan también con un mecanismo de accionamiento hexagonal de 1,25 mm en el centro del pilar. Esto asegura que los pilares satisfagan las necesidades de una amplia variedad de profesionales sin necesidad de la compra de herramientas adicionales.

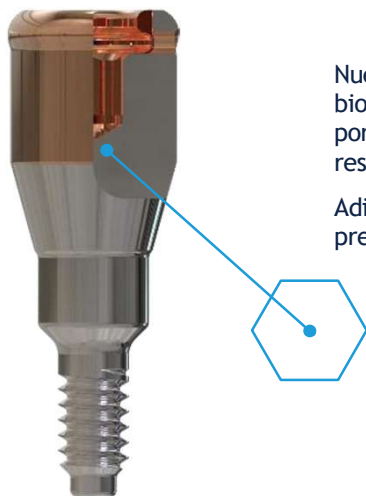

Insertos de retención de precisión en dos variaciones

Nylon (Standard)

Los insertos de retención son un componente crítico de cualquier sistema de fijación de sobredentadura y es vital que su rendimiento sea consistentemente alto para mantener la satisfacción del paciente. La experiencia indispensable de nuestros expertos ingenieros garantiza que el rendimiento y la funcionalidad de los insertos de retención Docklocs cumplan o superen sus expectativas. Los insertos de retención de nylon han evolucionado en los últimos 15 años para ser el estándar de la industria con una alta satisfacción del paciente.

Insertos de Alto Rendimiento (HPP)

Estos insertos de retención tienen una menor tendencia a absorber agua y una alta resistencia a los productos químicos y las grasas, incluidos los desinfectantes alcohólicos. Los insertos son extremadamente duraderos y tienen una excelente capacidad de carga dinámica.



PILARES ANGULADOS 18°

La disponibilidad de pilares en ángulo de 18° permite la restauración de implantes con hasta 65° de divergencia entre ellos. Esta es una gran mejora con respecto a los sistemas competitivos que no están indicados para la divergencia de más de 20°.

Docklocs 18° y los tornillos de ajuste permiten el ángulo del pilar en la orientación deseada.

Docklocs Denture Caps mejoradas para sobredentaduras

Docklocs Denture Caps tiene un diseño fácilmente reconocible con ranuras y secciones planas antirrotacionales mejoradas para una retención mecánica adicional en la dentadura. Para prótesis con acrílico fino, seleccione Docklocs Denture caps anodizada rosa para una apariencia más estética. Ambas Caps están hechas de titanio de grado médico para un rendimiento superior.



Docklocs
Denture Cap
Anodizada Rosa



Docklocs
Denture Cap mejorada
disponible en
packaging todo en uno

Embalaje todo en uno disponible

Además de la comodidad del sistema de fijación de sobredentadura Docklocs, hay disponible un embalaje todo en uno que contiene todos los elementos necesarios en un solo blister.

Esto incluye una Docklocs Denture Caps de sobredentadura e inserciones de retención de diferentes fuerzas, así como un poste posicionador y un transportador para pilares angulados.


Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información sobre los envases disponibles.



Referencia

Descripción

Packs Procesado

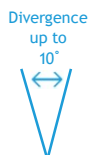


A0055.S.ZTA (2 Pack)	Pack de Procesamiento Standard con Docklocs Denture Caps mejorada anodizada rosa. Incluye inserto de procesamiento negro, y tres retenciones standard con distintos niveles de retención y un aro espaciador.		
A0055.T.ZTA (10 Pack)			
A0056.S.ZTA (2 Pack)	Pack de Procesamiento Divergente con Docklocs Denture Caps mejorada anodizada rosa. Incluye inserto de procesamiento negro, y tres retenciones divergentes de 20° con distintos niveles de retención y un aro espaciador.		
A0056.T.ZTA (10 Pack)			

Docklocs Denture Caps


A0011.SZ (4 Pack)	Docklocs Denture Caps mejorada anodizada rosa con inserto de retención negro		
A0011.SZT (10 Pack)			

Insertos de Retención Standard

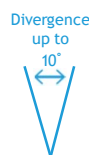

A0002.SZ (4 Pack)	Inserto de Retención Baja - Azul		
A0002.SZT (20 Pack)			
A0003.SZ (4 Pack)	Inserto de Retención Media - Rosa		
A0003.SZT (20 Pack)			
A0004.SZ (4 Pack)	Inserto de Retención Alta - Transparente		
A0004.SZT (20 Pack)			

Insertos de Retención divergentes

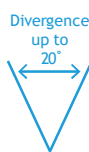

A0001.SZ (4 Pack)	Inserto de Retención Divergente Cero - Gris		
A0001.SZT (20 Pack)			
A0005.SZ (4 Pack)	Inserto de Retención Divergente Baja - Roja		
A0005.SZT (20 Pack)			
A0006.SZ (4 Pack)	Inserto de Retención Divergente Media - Naranja		
A0006.SZT (20 Pack)			
A0007.SZ (4 Pack)	Inserto de Retención Divergente Alta - Verde		
A0007.SZT (20 Pack)			

Inserto de Alto Rendimiento (HPP) Docklocs

Baja tendencia a absorber agua y alta resistencia a productos químicos y grasas



Pack Procesado Standard



Pack Procesado Divergente




Insertos de Remplazo Azules HPP Pack-8uds

Referencia

Descripción

Packs Procesado Retenciones HPP

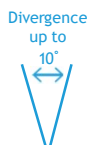

A0050.S.T (2 Pack)	Pack de Procesamiento Standard con Docklocs Denture Caps mejorada. Incluye inserto de procesamiento negro, y tres retenciones HPP con distintos niveles de retención y un aro espaciador.		
A0051.S.T (2 Pack)	Pack de Procesamiento Divergente con Docklocs Denture Caps mejorada. Incluye inserto de procesamiento negro, y tres retenciones HPP divergentes de 20° con distintos niveles de retención y un aro espaciador.		

Insertos de Retención Standard HPP



A0002.S (8 Pack)	Inserto de Retención HPP Baja - Azul		
A0003.S (8 Pack)	Inserto de Retención HPP Media - Rosa		
A0004.S (8 Pack)	Inserto de Retención HPP Alto - Transparente		

Insertos de Retención Divergentes HPP



A0001.S (8 Pack)	Inserto de Retención Divergente HPP Cero - Gris		
A0005.S (8 Pack)	Inserto de Retención Divergente HPP Baja - Rojo		
A0006.S (8 Pack)	Inserto de Retención Divergente HPP Medio - Naranja		
A0007.S (8 Pack)	Inserto de Retención Divergente HPP Alta - Verde		

Referencia

Descripción

Procesado Laboratorio

A0014.SZ (4 Pack) A0014.SZT (20 Pack)	Análogo Laboratorio (4mm Diámetro)		
A0026.SZ (4 Pack) A0026.SZT (20 Pack)	Análogo Angulado Laboratorio (4mm Diámetro)		
A0015.SZ (4 Pack) A0015.SZT (20 Pack)	Coping de Impresión (incluye inserto de procesado negro)		
A0012.SZ (4 Pack) A0012.SZT (20 Pack)	Espaciador de Procesamiento		

Componentes Barra

A0102.S (2 Pack) A0102.Z (10 Pack)	Docklocs Pilares para Barra H - 2.0mm		
A0017.SZ (4 Pack) A0017.SZT (20 Pack)	Inserto de Procesamiento para Barra - Amarillo		
A0011.SZB (4 Pack) A0011.SZBT (10 Pack)	Docklocs Denture Caps mejorada anodizada rosa con inserto Amarillo		
A0057.S.ZTA (2 Pack) A0057.T.ZTA (10 Pack)	Pack de Procesamiento para Barra con Docklocs Denture Caps anodizada rosa e insertos.		

Componentes de Recambio

A0008.SZ (4 Pack) A0008.SZT (20 Pack)	Inserto de Procesamiento Negro		
A0009.SZ (20 Pack)	Aro Espaciador		

Herramientas y Puntas

A0020	Universal Tool, 4-Piezas		
A0022	Punta Trilóbular CA		
A0025	Punta Hexagonal 1.25mm CA		

Docklocs Pilares Rectos



Implante Plataforma	Alturas						
	0mm	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm

Bego

Sub-Tec S / RI / RS / RSX 3.75mm-4.1mm		B0001.H	B0002.H	B0003.H	B0004.H	B0005.H	
Sub-Tec S / RI / RS / RSX 4.5mm		B0011.H	B0012.H	B0013.H	B0014.H	B0015.H	

BioHorizons®

Tapered Internal Implant System 3.5mm	BH0000.H	BH0001.H	BH0002.H	BH0003.H	BH0004.H	BH0005.H	
Tapered Internal Implant System 4.5mm	BH0010.H	BH0011.H	BH0012.H	BH0013.H	BH0014.H	BH0015.H	
Tapered Internal Implant System 5.7mm		BH0021.H	BH0022.H	BH0023.H	BH0024.H	BH0025.H	

CAMLOG®

iSy®		C0001.H	C0002.H	C0003.H	C0004.H	C0005.H	
CAMLOG® 3.3mm		C0011.H	C0012.H	C0013.H	C0014.H	C0015.H	
CAMLOG® 3.8mm		C0021.H	C0022.H	C0023.H	C0024.H	C0025.H	
CAMLOG® 4.3mm		C0031.H	C0032.H	C0033.H	C0034.H	C0035.H	
CAMLOG® 5.0mm		C0041.H	C0042.H	C0043.H	C0044.H	C0045.H	
CONELOG® 3.3mm		C0051.H	C0052.H	C0053.H	C0054.H		
CONELOG® 3.8mm		C0061.H	C0062.H	C0063.H	C0064.H	C0065.H	
CONELOG® 4.3mm		C0071.H	C0072.H	C0073.H	C0074.H	C0075.H	
CONELOG® 5.0mm		C0081.H	C0082.H	C0083.H	C0084.H	C0085.H	

Dentsply Sirona®

Astra OsseoSpeed® TX Aqua 3.5mm/4mm		AS0001.H	AS0002.H	AS0003.H	AS0004.H	AS0005.H	
Astra OsseoSpeed® TX Lilac 4.5mm/5mm		AS0011.H	AS0012.H	AS0013.H	AS0014.H	AS0015.H	
Astra OsseoSpeed® Profile EV 3.6mm		AS0021.H	AS0022.H	AS0023.H	AS0024.H	AS0025.H	
Astra OsseoSpeed® Profile EV 4.2mm		AS0031.H	AS0032.H	AS0033.H	AS0034.H	AS0035.H	
Astra OsseoSpeed® Profile EV 4.8mm		AS0041.H	AS0042.H	AS0043.H	AS0044.H	AS0045.H	
Ankylos® C/X		D0001.H	D0002.H	D0003.H	D0004.H	D0005.H	D0006.H

Medentis

ICX		M0001.H	M0002.H	M0003.H	M0004.H	M0005.H	
-----	--	---------	---------	---------	---------	---------	--

Alturas

Implante Plataforma

0mm	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MegaGen

AnyRidge®		MG0001.H	MG0002.H	MG0003.H	MG0004.H	MG0005.H	MG0006.H
AnyOne® Internal		MG0021.H	MG0022.H	MG0023.H	MG0024.H	MG0025.H	MG0026.H
AnyOne® Onestage		MG0011.H	MG0012.H	MG0013.H	MG0014.H	MG0015.H	MG0016.H
AnyOne® Mini		MG0031.H	MG0032.H	MG0033.H	MG0034.H	MG0035.H	MG0036.H

Nobel Biocare®

NobelReplace® Tri-Channel 3.5mm	N0000.H	N0001.H	N0002.H	N0003.H	N0004.H	N0005.H	N0006.H
NobelReplace® Tri-Channel 4.3mm	N0010.H	N0011.H	N0012.H	N0013.H	N0014.H	N0015.H	N0016.H
NobelReplace® Tri-Channel 5.0mm		N0021.H	N0022.H	NC0023.H	N0024.H	N0025.H	
NobelActive® Conical NP		N0031.H	N0032.H	N0033.H	N0034.H	N0035.H	N0036.H
NobelActive® Conical RP		N0041.H	N0042.H	N0043.H	N0044.H	N0045.H	N0046.H
Brånemark System® External Hex NP		N0051.H	N0052.H	N0053.H	N0054.H	N0055.H	N0056.H
Brånemark System® External Hex RP		N0061.H	N0062.H	N0063.H	N0064.H	N0065.H	N0066.H
Brånemark System® External Hex WP		N0071.H	N0072.H	N0073.H	N0074.H	N0075.H	

Straumann®

Bone Level NC		S0001.H	S0002.H	S0003.H	S0004.H	S0005.H	S0006.H
Bone Level RC		S0011.H	S0012.H	S0013.H	S0014.H	S0015.H	S0016.H
Tissue Level NNC		S0041.H	S0042.H	S0043.H	S0044.H	S0045.H	S0046.H
Tissue Level RN		S0031.H	S0032.H	S0033.H	S0034.H	S0035.H	S0036.H
Tissue Level WN		S0021.H	S0022.H	S0023.H	S0024.H	S0025.H	S0026.H

Zimmer Biomet®

Tapered Screw-Vent® 3.5mm	Z0000.H	Z0001.H	Z0002.H	Z0003.H	Z0004.H	Z0005.H	Z0006.H
Tapered Screw-Vent® 4.5mm	Z0010.H	Z0011.H	Z0012.H	Z0013.H	Z0014.H	Z0015.H	
Tapered Screw-Vent® 5.7mm		Z0021.H	Z0022.H	Z0023.H	Z0024.H	Z0025.H	Z0026.H
3i External Hex NP 3.25mm/3.4mm		Z0031.H	Z0032.H	Z0033.H	Z0034.H	Z0035.H	
3.4mm Certain® Connection		Z0041.H	Z0042.H	Z0043.H	Z0044.H	Z0045.H	
4.1mm Certain® Connection		Z0051.H	Z0052.H	Z0053.H	Z0054.H	Z0055.H	


Selección de Altura



1. Con una sonda periodontal milimétrica, mida el punto más alto de la encía desde la base del implante.
2. Seleccione la altura del pilar Docklocs que mejor se corresponda con esa medida. Si la medida es de 3 mm, seleccione la altura del pilar de 3 mm. Si la medida es de 3,5 mm, seleccione el pilar de 4 mm.
3. 1,75 mm adicionales al pilar se extenderá por encima de la encía para permitir que la prótesis se asiente adecuadamente sin pinzamiento tisular. Las mediciones de la altura de los pilares angulados deben determinarse con el mismo proceso.



Docklocs Pilares Angulados 18°

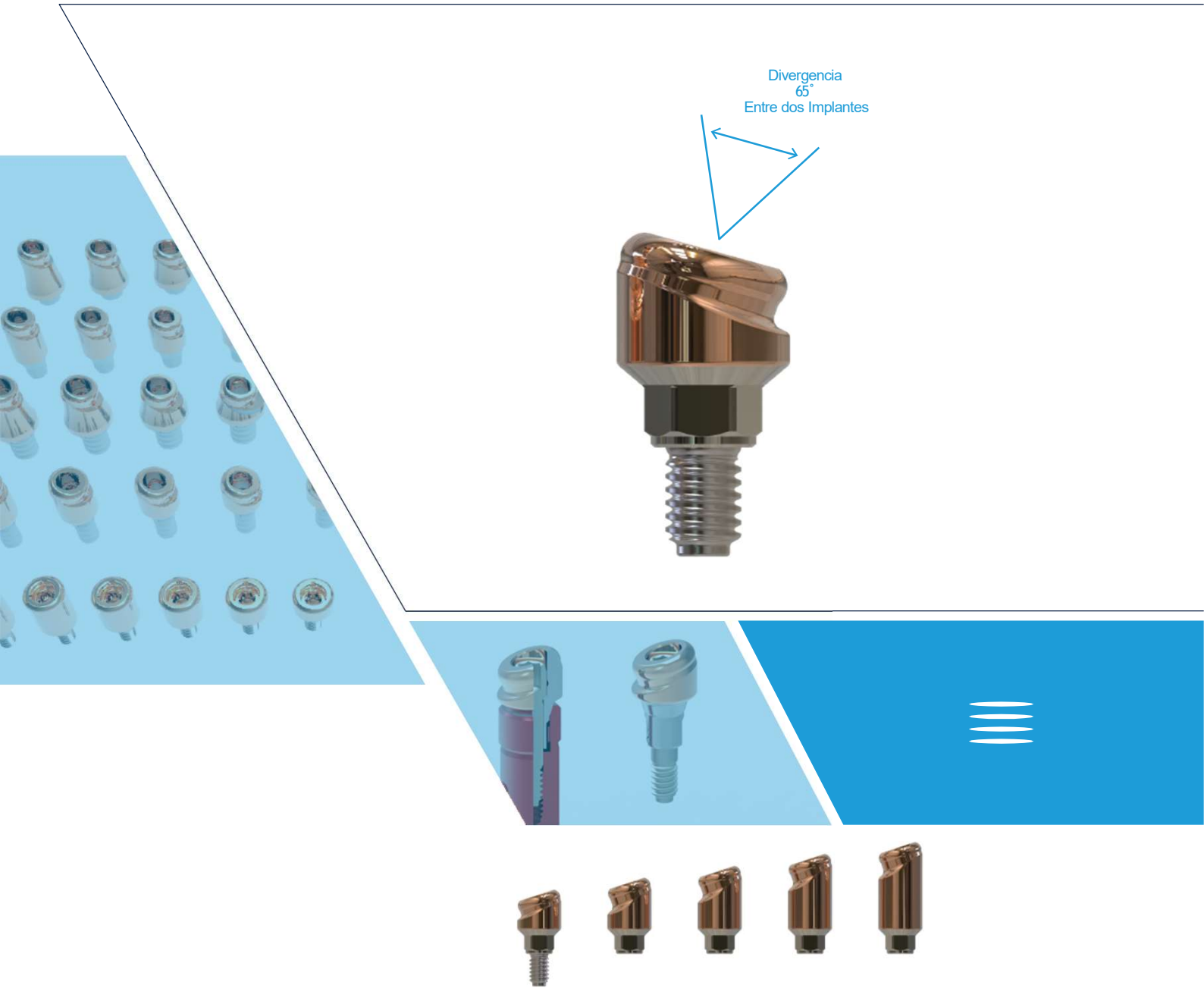

Pilares Angulados 18°		Alturas					
Implante Plataforma	Variation (A/B)	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm

Bego

Sub-Tec S / RI / RS / RSX 3.75mm-4.1mm	A	B0701.H	B0702.H	B0703.H	B0704.H	B0705.H	
Sub-Tec S / RI / RS / RSX 3.75mm-4.1mm	B	B0801.H	B0802.H	B0803.H	B0804.H	B0805.H	
Sub-Tec S / RI / RS / RSX 4.5mm	A	B0711.H	B0712.H	B0713.H	B0714.H	B0715.H	
Sub-Tec S / RI / RS / RSX 4.5mm	B	B0811.H	B0812.H	B0813.H	B0814.H	B0815.H	

Pilares Angulados 18°

Implante Plataforma

Variation
(A/B)

1mm

2mm

Alturas

3mm

4mm

5mm

6mm

CAMLOG®

iSy®	A	C0701.H	C0702.H	C0703.H	C0704.H	C0705.H	
iSy®	B	C0801.H	C0802.H	C0803.H	C0804.H	C0805.H	
CAMLOG® 3.3mm	A	C0711.H	C0712.H	C0713.H	C0714.H	C0715.H	
CAMLOG® 3.3mm	B	C0811.H	C0812.H	C0813.H	C0814.H	C0815.H	
CAMLOG® 3.8mm	A	C0721.H	C0722.H	C0723.H	C0724.H	C0725.H	
CAMLOG® 3.8mm	B	C0821.H	C0822.H	C0823.H	C0824.H	C0825.H	
CAMLOG® 4.3mm	A	C0731.H	C0732.H	C0733.H	C0734.H	C0735.H	
CAMLOG® 4.3mm	B	C0831.H	C0832.H	C0833.H	C0834.H	C0835.H	
CAMLOG® 5.0mm	A	C0741.H	C0742.H	C0743.H	C0744.H	C0745.H	
CAMLOG® 5.0mm	B	C0841.H	C0842.H	C0843.H	C0844.H	C0845.H	
CONELOG® 3.3mm	A	C0751.H	C0752.H	C0753.H	C0754.H		
CONELOG® 3.3mm	B	C0851.H	C0852.H	C0853.H	C0854.H		
CONELOG® 3.8mm	A	C0761.H	C0762.H	C0763.H	C0764.H	C0765.H	
CONELOG® 3.8mm	B	C0861.H	C0862.H	C0863.H	C0864.H	C0865.H	
CONELOG® 4.3mm	A	C0771.H	C0772.H	C0773.H	C0774.H	C0775.H	
CONELOG® 4.3mm	B	C0871.H	C0872.H	C0873.H	C0874.H	C0875.H	
CONELOG® 5.0mm	A	C0781.H	C0782.H	C0783.H	C0784.H	C0785.H	
CONELOG® 5.0mm	B	C0881.H	C0882.H	C0883.H	C0884.H	C0885.H	

Dentsply Sirona®

Astra OsseoSpeed® TX Aqua 3.5mm/4mm	A	AS0701.H	AS0702.H	AS0703.H	AS0704.H	AS0705.H	
Astra OsseoSpeed® TX Lilac 4.5mm/5mm	A	AS0711.H	AS0712.H	AS0713.H	AS0714.H	AS0715.H	
Astra OsseoSpeed® Profile EV 3.6mm	A	AS0721.H	AS0722.H	AS0723.H	AS0724.H	AS0725.H	
Astra OsseoSpeed® Profile EV 3.6mm	B	AS0821.H	AS0822.H	AS0823.H	AS0824.H	AS0825.H	
Astra OsseoSpeed® Profile EV 4.2mm	A	AS0731.H	AS0732.H	AS0733.H	AS0734.H	AS0735.H	
Astra OsseoSpeed® Profile EV 4.2mm	B	AS0831.H	AS0832.H	AS0833.H	AS0834.H	AS0835.H	
Astra OsseoSpeed® Profile EV 4.8mm	A	AS0741.H	AS0742.H	AS0743.H	AS0744.H	AS0745.H	
Astra OsseoSpeed® Profile EV 4.8mm	B	AS0841.H	AS0842.H	AS0843.H	AS0844.H	AS0845.H	
Ankylos® C/X	A	D0701.H	D0702.H	D0703.H	D0704.H	D0705.H	

Medentis

ICX	A	M0701.H	M0702.H	M0703.H	M0704.H	M0705.H	
ICX	B	M0801.H	M0802.H	M0803.H	M0804.H	M0805.H	

MegaGen

AnyRidge®	A	MG0701.H (GH1,5mm)		MG0702.H (GH3,0mm)	MG0703.H (GH4,5mm)		
AnyRidge®	B	MG0801.H (GH1,5mm)		MG0802.H (GH3,0mm)	MG0803.H (GH4,5mm)		
AnyOne® Onestage	A	MG0711.H	MG0712.H	MG0713.H	MG0714.H	MG0715.H	MG0716.H

Pilares Angulados 18°

Implante Plataforma

Variation
(A/B)

1mm

2mm

Alturas

3mm

4mm

5mm

6mm

Nobel Biocare®

NobelReplace® Tri-Channel 3.5mm	A	N0701.H		N0703.H		N0705.H	
NobelReplace® Tri-Channel 4.3mm	A	N0711.H		N0713.H		N0715.H	
NobelActive® Conical NP	A	N0731.H		N0733.H		N0735.H	
NobelActive® Conical RP	A	N0741.H		N0743.H		N0745.H	
Brånemark System® External Hex NP	A	N0751.H		N0753.H		N0755.H	
Brånemark System® External Hex RP	A	N0761.H	N0762.H	N0763.H	N0764.H	N0765.H	

Straumann®

Bone Level NC	A	S0701.H	S0702.H	S0703.H	S0704.H	S0705.H	
Bone Level NC	B	S0801.H	S0802.H	S0803.H	S0804.H	S0805.H	
Bone Level RC	A	S0711.H	S0712.H	S0713.H	S0714.H	S0715.H	
Bone Level RC	B	S0811.H	S0812.H	S0813.H	S0814.H	S0815.H	
Tissue Level RN	A	S0731.H	S0732.H	S0733.H	S0734.H	S0735.H	

Zimmer Biomet®

Tapered Screw-Vent® 3.5mm	A	Z0701.H	Z0702.H	Z0703.H	Z0704.H	Z0705.H	
Tapered Screw-Vent® 3.5mm	B	Z0801.H	Z0802.H	Z0803.H	Z0804.H	Z0805.H	
Tapered Screw-Vent® 4.5mm	A	Z0711.H		Z0713.H		Z0715.H	
3i External Hex NP 3.25mm/3.4mm	A	Z0731.H		Z0733.H		Z0735.H	
4.1mm Certain® Connection	A	Z0751.H		Z0753.H		Z0755.H	



Seleccione el pilar correcto con el sistema innovador de Docklocs Selection Abutments

Disponible para una variedad de plataformas de implantes. Para utilizar mejor las características antirrotacionales de cada conexión, los pilares Docklocs Angulados están disponibles en variantes "A" y "B" que se giran 45 ° entre sí.

Nuestros Docklocs Selection Abutments le permiten determinar rápida y fácilmente si la variante A o B es la más adecuada para su caso.

Además, Docklocs Selection Abutment incluyen réplicas de pilares rectos en diferentes alturas para que pueda verificar su medición y visualización del pilar final.



Bego

Sub-Tec S / RI / RS / RSX 3.75mm-4.1mm	AWB00.S
Sub-Tec S / RI / RS / RSX 4.5mm	AWB01.S

CAMLOG®

CAMLOG® 3.3mm	AWC01.S
CAMLOG® 3.8mm	AWC02.S
CAMLOG® 4.3mm	AWC03.S
CONELOG® 3.8mm	AWC06.S
CONELOG® 4.3mm	AWC07.S

Dentsply Sirona®

Astra OsseoSpeed® Profile EV 3.6mm	AWAS02.S
Astra OsseoSpeed® Profile EV 4.2mm	AWAS03.S

Medentis

ICX	AWM00.S
-----	---------

MegaGen

AnyRidge®	AWMG00.S
-----------	----------

Nobel Biocare®

NobelReplace® Tri-Channel 3.5mm	AWN00.S
NobelReplace® Tri-Channel 4.3mm	AWN01.S
NobelActive® Conical NP	AWN03.S
NobelActive® Conical RP	AWN04.S
Brånemark System® External Hex NP	AWN05.S
Brånemark System® External Hex RP	AWN06.S

Straumann®

Bone Level NC	AWS00.S
Bone Level RC	AWS01.S
Tissue Level RN	AWS03.S

Zimmer Biomet®

Tapered Screw-Vent® 3.5mm	AWZ00.S
Tapered Screw-Vent® 4.5mm	AWZ01.S
3i External Hex NP 3.25mm/3.4mm	AWZ03.S



Docklocs®

OVERDENTURE ATTACHMENT SYSTEM

Distributed By:



Abutments4ever S.L

Tel: +34 910 053 743

administracion@abutments4ever.com

www.abutments4ever.com

≡ MEDEALIS

Im Steinböhl 9
69518 Absteinach
Germany
www.medealis.de
+49 6207 2032 597



Docklocs® is a registered trademark of MEDEALIS GmbH. Please refer to individual product labeling or instructions for use for additional product information. Product availability may be limited to select countries and/or regions depending on regulatory clearances. Consult with your local distributor for more information. This material is intended for clinicians only and does not comprise medical advice or recommendations. This material may not be copied or reprinted without the express consent of MEDEALIS GmbH.
©2020 All Rights Reserved.